

11.错误讯息与解决方式

Er1 - 关于血糖试纸的错误讯息：
插入的试纸可能已经被用过或遭损坏。请以新试纸重新做测试。



Er2 - 关于血糖仪的错误讯息：
血糖仪故障。请作质量控制测试或者重新装置电池，来检查血糖仪是否功能正常。如果屏幕上仍然出现错误讯息，请联络华广公司授权经销商或华广公司客服人员。



Er3 - 血糖仪的错误讯息：
当您进行测试时，因不正常操作血糖仪产生不稳定信号，请重新使用新的试纸。



关于电池电力
的讯息

1.「」符号会闪烁表示电池电力不足，请尽快更换电池，此时仍可以进行测试。



2.「」及「**Error**」符号会闪烁表示电池电力已经非常低，血糖仪无法进行测试，请马上更换电池。



3.更换电池后,请做质量控制测试。

关于温度的错误讯息

为求得正确的测试结果，请在 10~40℃（50~104°F）温度范围内作测试。

1.温度介于 0~9℃（32~48°F）或 41~50℃（106~122°F）时，「」警示符号会闪烁，仍可以进行测试但可能会求得不正确的测试结果，仅供参考。请在操作温度范围内重新做测试（10~40℃ 或 50~104°F）。



2.当从试纸测试温度范围外的空间进入温度范围内的环境时，等待30分钟后再作测试。



3.当温度已低于 0℃（32°F）或高于 50℃（122°F），此时无法进行测试，并且此状况下「**Error**」符号会闪烁。请将血糖仪移至温度范围 10~40℃（50~104°F）的环境内，等待30分钟后再作测试。



关于太早加入血样的错误信息




当血糖仪未准备好之前血样即被加入，必须用新试纸重新作测试。请在「」出现后再加入血样。

血糖仪不启动

如遇血糖仪无法正常启动情况时,请按如下步骤

1.打开电池背盖,取出电池。

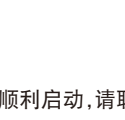

2.等待5分钟后再重新装置电池。
按照如上步骤,血糖仪则可顺利启动。若还不能顺利启动,请联络经销商或客服中心。

规格

测量方法	氧化酵素电极传感器
血样	毛细血管全血
血样量	1.4 μL
测量范围	0.6-33.3 mmol/L（毫摩尔）
读取时间	8秒
记忆容量	150笔测试结果含时间及日期
省电装置	2分钟不使用，即自动关闭

操作温度	10 ~ 40℃（50 ~ 104°F）
操作相对湿度	10 - 90%
血球容积	30 - 55%
电力供应	1颗 CR2032 电池
电池寿命	大约1000次测试
血糖仪尺寸	95.0 mm x 43.8 mm x 13.0 mm
血糖仪重量	43.0 g（含电池）
屏幕	LCD 屏幕
显示区域	39.0 mm x 38.0 mm
血糖仪保存条件	-10 ~ 60℃（14 ~ 140°F）
血糖试纸保存条件	4 ~ 30℃（39 ~ 86°F），< 90% 相对湿度

血糖仪的保养

保养
请保持您的血糖仪不接触到灰尘、水或任何其他液体溶剂，当您不须使用血糖仪时，请将血糖仪存放于携带包内。

清洁
用半干湿布及少量温和的肥皂或清洁剂擦拭血糖仪外部，请注意避免试纸插入口及试纸座插底部受潮。

限制
- 瑞特 **Rightest**® 血糖试纸是专为使用毛细血管的全血样所设计，请勿使用血浆或血清血样。
- 在高于3048公尺(10000尺)以上的海拔高度，可能会获得不精确的测试结果。
- 血球容积低于30%，可能会使得结果偏高；血球容积高于55%，可能会使得结果偏低。
- 严重脱水和过度缺乏水份可能会导致测得不正确的偏低结果。
- 瑞特 **Rightest**® 血糖仪尚未被批准使用于婴儿。
- 下述物质于以下各别的浓度含量会影响测试的结果：
尿酸 Uric acid>0.54 mmol/L
胆固醇 Cholesterol>6.5 mmol/L

客户服务
我们诚恳地希望能够提供所有的客户完整及贴心的服务，请阅读所有相关的指示，以确保您能够依正确的测试步骤操作。如有任何疑问或建议，欢迎您随时拨我们的客户服务电话：8008190185，或发电子邮件到 info@bionime.com 与我们连络。

保证
华广生技公司提供您自购买瑞特 **Rightest**® 血糖仪起5年的保固及维修，在保固期间内我们将会为您做免费的血糖仪维修及更换。
此保固仅提供于购买华广生技公司原厂出品之瑞特 **Rightest**® 血糖仪，如有经过人为损坏、改装、篡改、毁损或滥用，我们则不提供以上的保固。
请填妥并寄回附上之保证卡至华广生技股份有限公司。
不同的盒装机种可能有不同的包装内容，有些盒装机种可能没有保证卡。

瑞特 **Rightest**® 血糖仪
生产企业：华广生技股份有限公司大庆厂
台湾台中市南区大庆街二段100号

IVD体外诊断医疗器械

LOT批号

查阅使用说明书

生物性危害

有效日期

生产企业

直流电压

勿重复使用

警示符号

温度限制

WEEE环保标示

STERILER

灭菌方法/放射线照射

血糖仪注册证编号：
国食药监械(许)字2014第2400130号
血糖仪注册产品标准编号：
YZB/国(台)5913-2014



注册人及生产企业：
华广生技股份有限公司大庆厂
注册及生产地址：
台湾台中市南区大庆街二段100号
生产日期：见包装外盒

售后服务机构：
华广生物科技(深圳)有限公司
深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区
富康商业广场8栋富康科技大厦九楼A区
电话：86 755 8214 6630
传真：86 755 8214 6632
客户服务电话：800 8190185

说明书批准日期：2014/09/22
说明书最新变更日期：2016/07/12

代理人名称：
华广生物技术(平潭)有限公司
代理人住所：
平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

发行日期：2017-09

101-3GM100-187
CN