


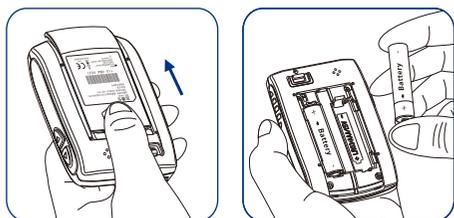


1 > 安装电池

- 打开血糖仪背面的盖子，依次装入两颗电池，并确定其被装置在正确的方向。（电池室内有电池正负极图示，请参照安装）



2 > 安装试纸座

- 1) 将血糖仪翻回正面，并手持试纸座靠近于血糖仪右上方的位置，依①方向沿卡沟向下滑入，再依②方向下压。
- 2) 下压试纸座直到试纸座稳固地卡入血糖仪上。

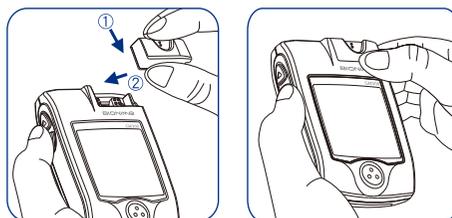


3 > 血糖仪设定 - 设定日期、时间

- 1) 按主按键「⊙」启动血糖仪。
- 2) 按住主按键「⊙」五秒直到进入设定方式。在进入设定方式前你将会看到电源关闭的动作，此时请继续按住按钮，直到进入设定方式，屏幕上之年份格式会闪烁。
- 3) 按上浏览按键「△」或下浏览按键「▽」更改年份。
- 4) 按主按键「⊙」确认该年份并切换到月份设定。




- 5) 重复步骤3及4更改日期、时间格式，小时、分钟的设定。按主按键「⊙」确认后即完成设定。

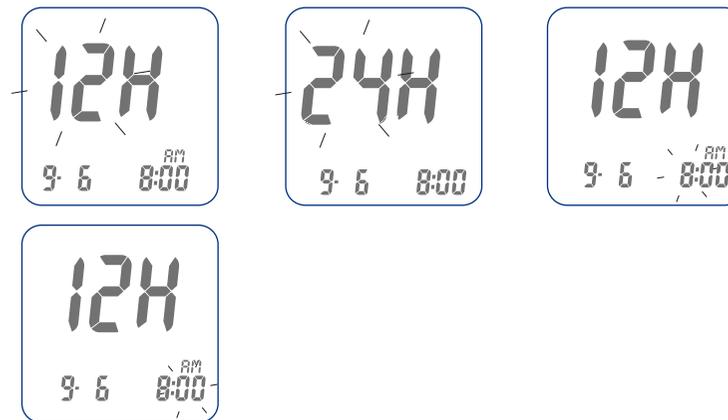

4 > 准备采血笔


- 1) 拉开采血笔头。
- 2) 将采血针放入采血笔的置针架内。
- 3) 旋转取下采血针保护盖，并保留保护盖。

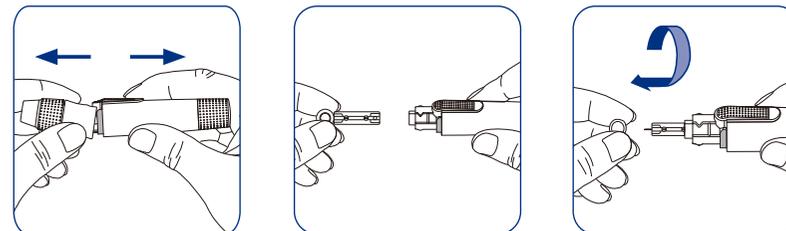

4) 压回关上采血笔笔头。


5) 旋转笔头选择深度并确认选定深度对准窗口，以便取适合的血量。深度设定是以个人皮肤状况为基准：“”为柔软或较薄皮肤用；“”为一般皮肤用；“”为较厚皮肤用。

6) 一手握住采血笔，另一手将采血笔拉柄后拉到底，采血笔将会扣起释放按钮。放开拉柄，此时拉柄会自动回到原本接近释放按钮的位置。

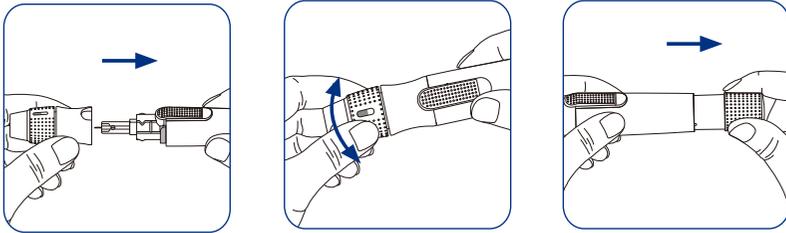


5 进行测量


- 1) 请先清洗并且完全擦乾您的双手。从试纸罐内取出新的试纸，并立即盖上试纸罐的盖子。
- 2) 如图示，将试纸有蓝色盖片那一面，面向使用者且箭头向下，插入试纸座入口，并将试纸推进试纸座底部直到卡住停止。此时血糖仪会自动开机，并同时听到一声「哔」。

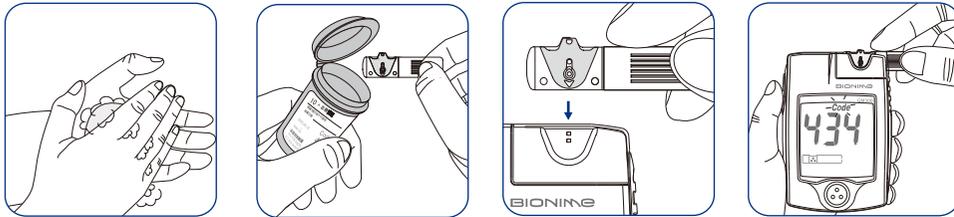

- 3) 此时血糖仪屏幕会出现闪烁的校正码(code)，请确认试纸罐标签上的校正码(code)和血糖仪屏幕上的校正码(code)是相同的。
- 4) 当「」信号开始闪烁时，就表示可以开始采血样。握住采血笔紧贴您的指尖，然后按住采血笔上的释放按钮采血样。

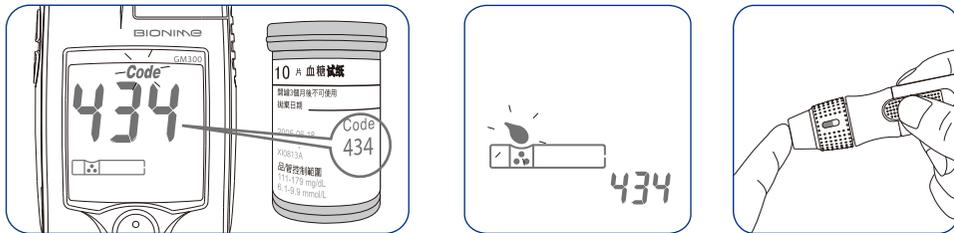

- 5) 用手挤压您的指尖以便采一滴血样，我们的血糖仪只需要极微量的血样，建议采约 1.4~2.5μL 的血样来做测试，注意请不要挤压太多的血量，以避免污染试纸座。

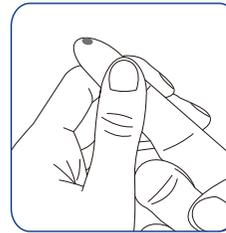


血样大小范围




建议采血量为1.4~2.5μL。过多的血量样(例如超过4.0μL可能会污染试纸座。

- 6) 将您的手指血样接触并停留试纸血样入口，直到听到哔一声及看到观察窗口完全充满血液为止。如果观察窗口没有完全被血液充满或没有启动测试。请即刻丢弃此试纸，并用新试纸重复上述步骤。
- 7) 当血样采入试纸后，您会看到萤幕上显示倒数计时的时间，此即表示血糖仪正在测量您的血糖值。8秒后即显示您的测试结果，有关测量结果，如需更详细的说明请参考瑞特血糖仪使用手册。

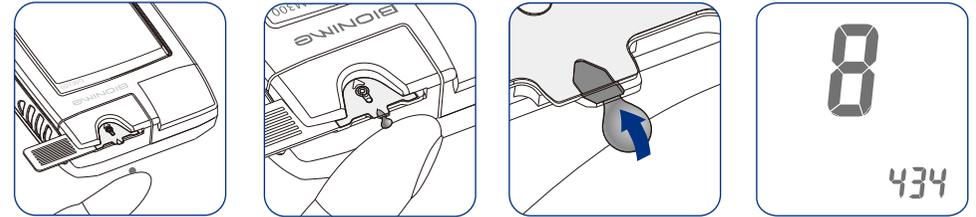

- 8) 拨开采血笔头，将留存的采血针保护盖放在桌上，以握笔的方式握住采血笔，将针头插入采血针保护盖，然后丢弃在不会刺伤他人的容器内。
- 9) 一手按住笔杆的释放钮另一手将拉柄往后拉，则可顺利将使用过后的采血针退出。
- 10) 将使用过的采血针弃置于防止穿刺的容器。
- 11) 完成以上测试后，盖上采血笔头。

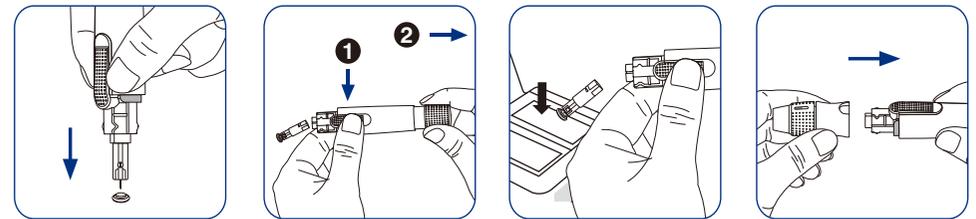

详细的血糖仪操作步骤及测量结果说明请参阅使用手册。

血糖仪注册证编号：国食药监械(许)字2014第2400125号
血糖仪注册产品标准编号：YZB/国(台) 5501-2014

代理人名称：华广生物技术(平潭)有限公司
代理人住所：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

BIONIME
注册人及生产企业：
华广生技股份有限公司大庆厂
注册及生产地址：
台湾台中市南区大庆街二段100号
http://www.bionime.com

售后服务机构：华广生物科技(深圳)有限公司
深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区
富康商业广场8栋富康科技大厦九楼A区
电话：86 755 82146630
传真：86 755 82146632
客户服务电话：800 8190185