

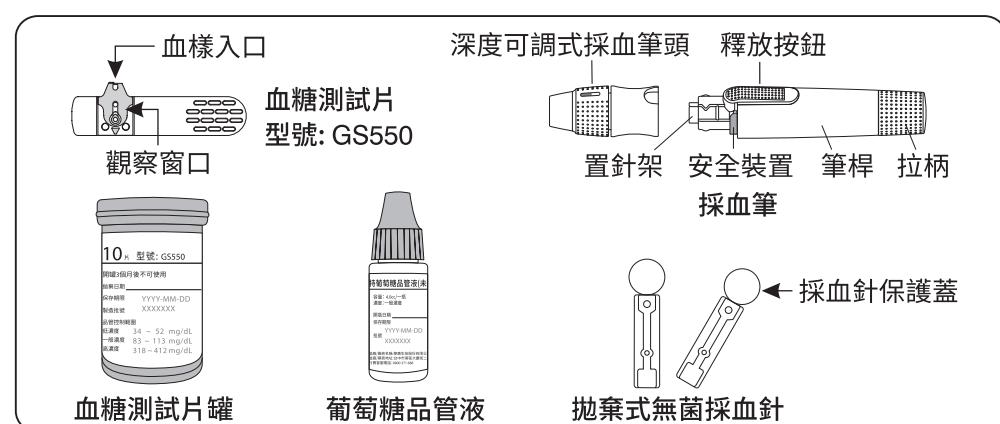


瑞特血糖監測系統 RIGHTEST® 型號：GM550 - 簡易使用說明

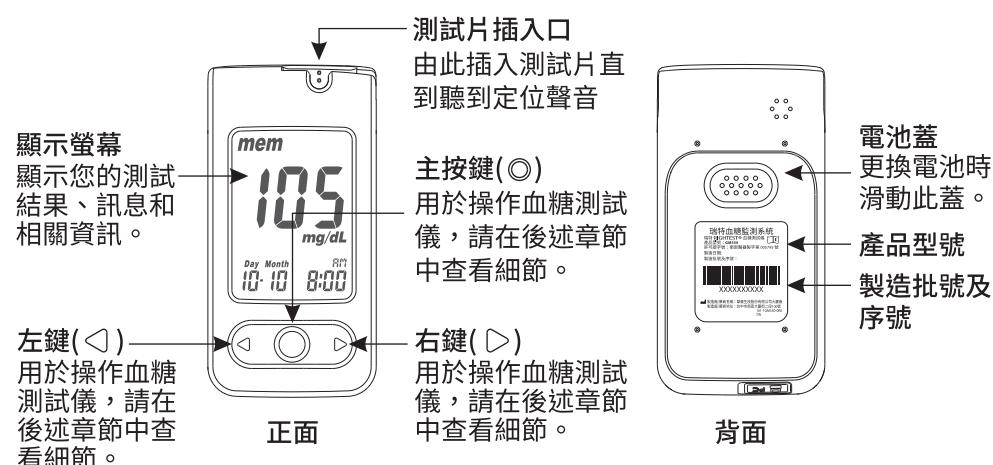

1> 安裝電池

- 1) 將血糖測試儀翻轉。按下並推動電池蓋即可將電池蓋卸下。
- 2) 安裝電池，確保電池以正確的方向放置。
- 3) 將電池蓋滑回原位置，直到電池蓋滴答一聲咬合到位。

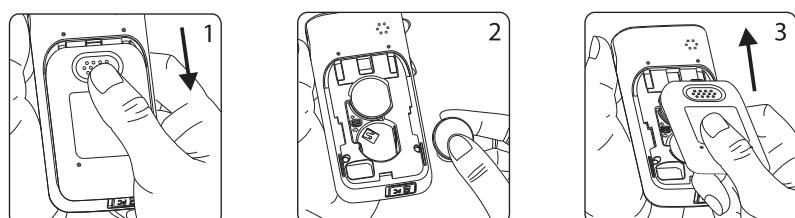


2> 設置您的血糖測試儀

- 1) 按下主按鍵啟動血糖測試儀。
- 2) 按住主按鍵「○」七秒直到進入設定模式。在進入設定模式前你將會看到電源關閉的動作，此時請繼續按住按鈕，直到進入設定模式，螢幕上之年份格式會閃爍。
- 3) 按左鍵「<」或右鍵「>」更改年份。
- 4) 按主按鍵「○」確認該年份並切換到月份設定。




- 5) 重複步驟3及4更改日期、時間格式、小時、分鐘、及音量設定。按主按鍵「○」確認後即完成設定。

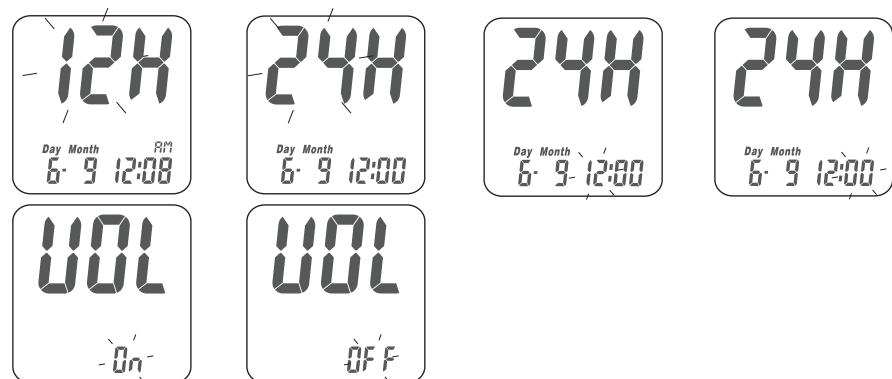


3> 準備採血筆

- 1) 拉開採血筆頭。
- 2) 將採血針放入採血筆的置針架內。
- 3) 旋轉取下採血針保護蓋，並保留保護蓋。

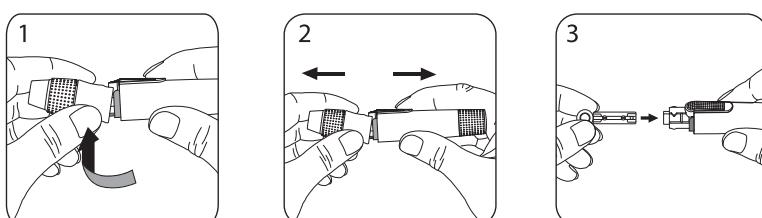


- 4) 壓回關上採血筆筆頭。
- 5) 旋轉筆頭選擇深度並確認選定深度對準視窗，以便取適合的血量。深度設定是以個人皮膚狀況為基準：" "為柔軟或較薄皮膚用；" "為一般皮膚用；" " "為較厚皮膚用。
- 6) 一手握住採血筆，另一手將採血筆拉柄後拉到底，採血筆將會扣起釋放按鈕。放開拉柄，此時拉柄會自動回到原本接近釋放按鈕的位置。

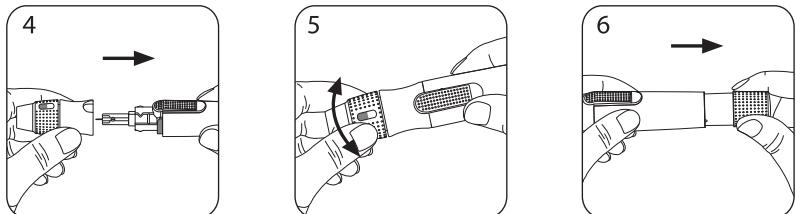


4> 進行測量


- 1) 請先清洗並且完全擦乾您的雙手。從測試片罐內取出新的測試片，並立即蓋上測試片罐的蓋子。
- 2) 如圖示，將測試片有綠色蓋片那一面，面向使用者且箭頭向下，插入測試座入口，並將測試片推進測試座底部直到卡住停止。此時血糖測試儀會自動開機，並同時聽到一聲「哩」。
- 3) 伴隨著 "嘟" 的一聲，出現了一個血滴符號 「●」。現在您可以在2分鐘之內提供血樣。將採血筆對準並貼緊指尖以備採血，然後按下釋放按鈕進行採血。（建議最佳刺針位置為中指或無名指）

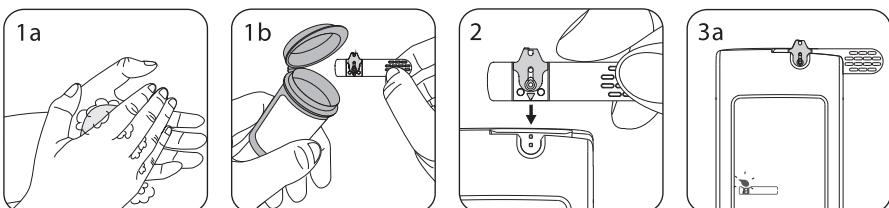

- 4) 用手擠壓您的指尖以便採一滴血樣，我們的血糖測試儀只需極微量的血樣，建議採約0.75 ~ 3.0 μL 的血樣量來做測試，**注意請不要擠壓太多的血量，以免避免污染血糖測試儀**。低於0.75 μL 的血樣量可能會導致檢測結果不準確。在這種情況下，請用新的測試片重新檢測。

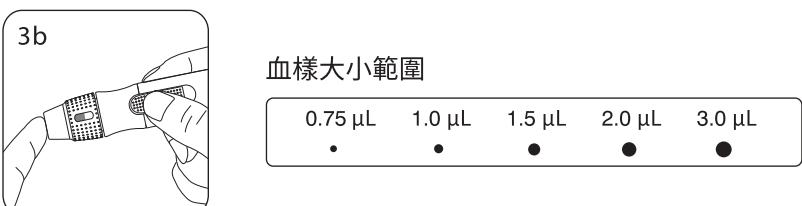

- 5) 將您的手指血樣接觸並停留測試片血樣入口，直到聽到哩一聲及看到觀察窗口完全充滿血液為止。如果觀察窗口沒有完全被血液充滿或沒有啟動測試。請即刻丟棄此測試片，並用新測試片重複上述步驟。
- 6) 當血樣採入測試片後，您會看到螢幕上顯示倒數計時的時間，此即表示血糖測試儀正在測量您的血糖值。5秒後即顯示您的測試結果，有關測量結果，如需更詳細的說明請參考瑞特血糖測試儀使用手冊。

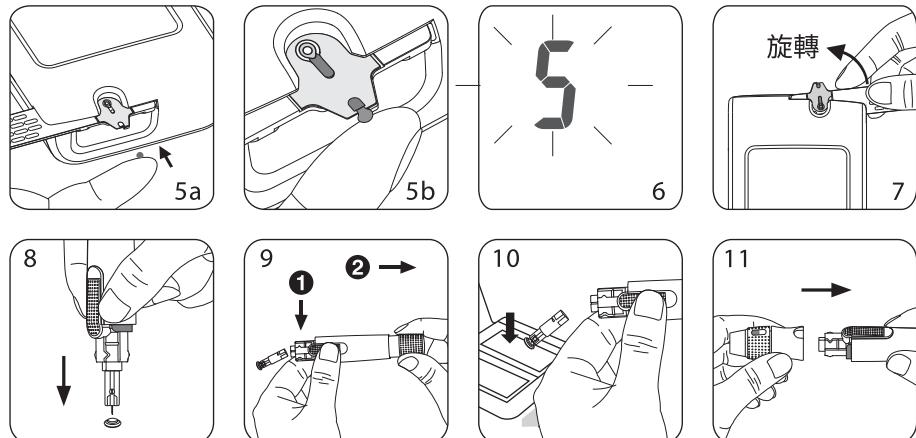

- 7) 以旋轉方式取下試片並依照法規或行政規定適當地處理或丟棄。
- 8) 拔開採血筆頭，將留存的採血針保護蓋放在桌上，以握筆的方式握住採血筆，將針頭插入採血針保護蓋。
- 9) 一手按住筆桿的釋放鈕另一手將拉柄往後拉，則可順利將使用過後的採血針退出。
- 10) 將使用過的採血針棄置於防止穿刺的容器。
- 11) 完成以上測試後，蓋上採血筆頭。

注意：

- 請使用拋棄式採血針具，並限單次使用。
- 當每一次測試結束後，應適當清潔血糖測試儀，去除感染源。
- 為不同病患進行檢測時，應更換手套。

詳細的血糖測試儀操作步驟及測量結果說明請參閱使用手冊。

發行日期：2021-04

許可證字號：衛部醫器製字第005795號

BIONIME

■ 製造廠/藥商名稱：華廣生技股份有限公司大慶廠
製造廠/藥商地址：台中市南區大慶街二段100號
免付費客服電話：0800-371-688
電話：04-23692388
傳真：04-22617586
Email: info@bionime.com
<http://www.bionime.com>