
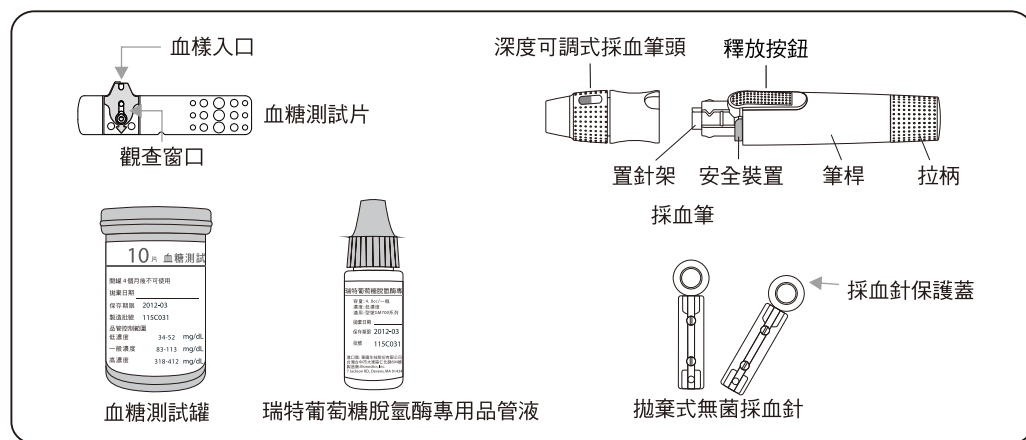



瑞特血糖監測系統

瑞特血糖測試儀 - 簡易使用說明 (型號: GM700)

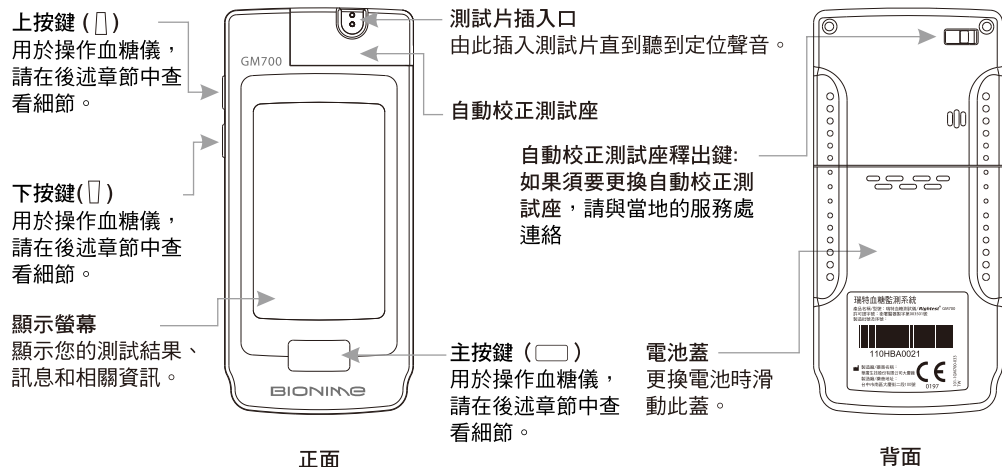


1 安裝電池

- 1) 將血糖測試儀翻轉到背面。按下並推動電池蓋即可將電池蓋卸下。
- 2) 安裝電池，確保電池以正確的方向放置。
- 3) 將電池蓋滑回原位，直到電池蓋卡答一聲咬合到位。

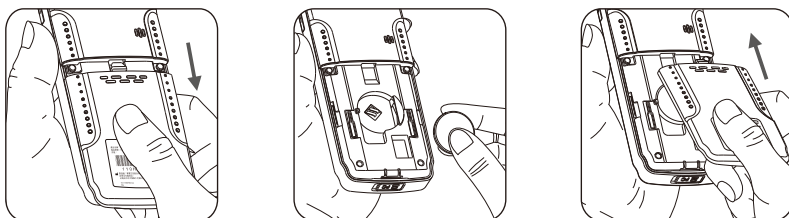

2 自動校正測試座

自動校正測試座可用來自動偵測試片的公式碼，讓每批的試片在血糖儀上表現測試一致，無須再特意對碼。因此自動校正測試座不需每次進行更換。

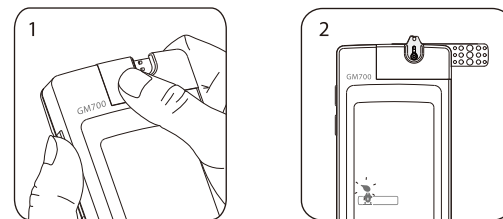

注意事項:


- 如果當此測試座受到汙染或損害時，請聯絡當地的客服部門進行更換與安裝。

3 設置您的血糖測試儀-設定日期、時間、音量

- 1) 按下並釋放主按鍵 "□" 啟動血糖儀
- 2) 按住主按鍵 "□" 7秒鐘，直到聽到 "嘟" 的一聲，這表示您已經成功進入了設定模式。在進入設定模式前您將會看到電源關閉的動作，此時繼續按住按鈕，直到進入設定模式，螢幕上的年份格式會閃爍。
- 3) 按側上鍵 "□" 或側下鍵 "□" 調整年份。
- 4) 按主按鍵 "□" 確認該年份並切換至月份設定。




- 5) 重複步驟3及4更改日期、時間 (小時、分鐘)、音量。按主按鍵確認即完成設定。

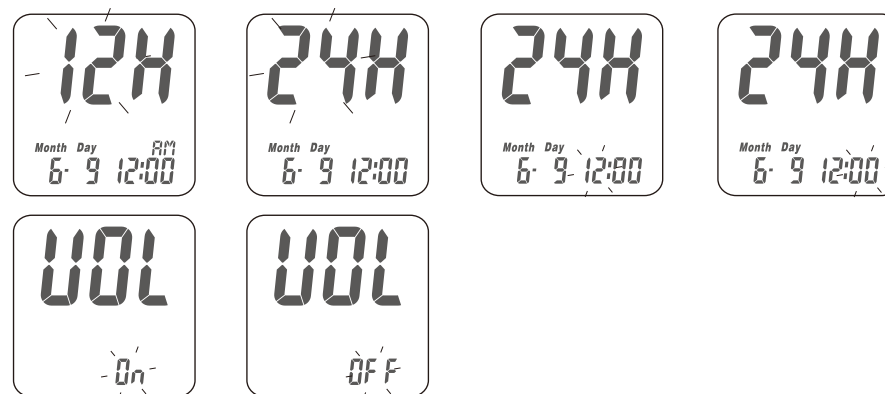


4 準備採血筆

- 1) 一手握住採血筆頭，另一手握住筆桿。稍微向下施力，筆頭與筆桿分離後，再向兩側拉出。
- 2) 拉開採血筆頭。
- 3) 將採血針放入採血筆的置針架內。

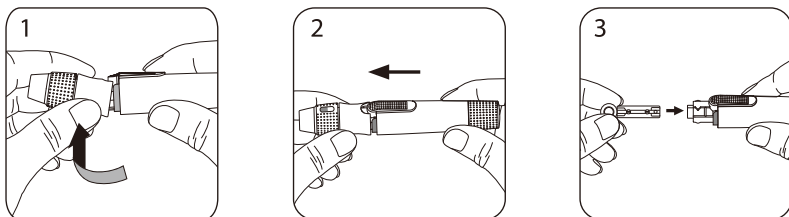


- 4) 旋轉取下採血針保護蓋，並保留保護蓋。
- 5) 壓回關上採血筆筆頭。
- 6) 旋轉筆頭選擇深度並確認選定深度對準視窗，以便取適合的血量。
深度設定是以個人皮膚狀況為基準：
" " 為柔軟或較薄皮膚用；
" " 為一般皮膚用；
" " 為較厚皮膚用。
- 7) 一手握住採血筆，另一手將採血筆拉柄後拉到底，採血筆將會扣起釋放按鈕。放開拉柄，此時拉柄會自動回到原本接近釋放按鈕的位置。

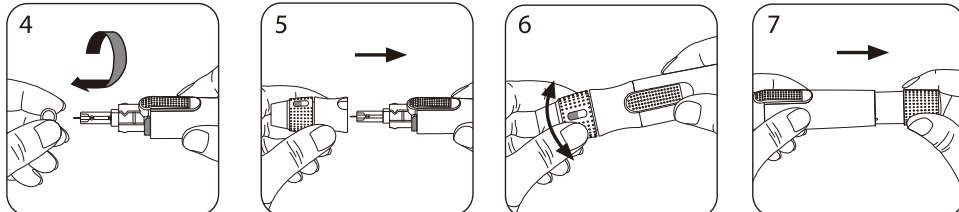


5 進行量測


- 1) 請先清洗並完全擦乾您的雙手。從試片罐中拿出一片新測試片，並馬上蓋上試片罐的蓋子。
- 2) 如圖示，將血糖測試片插入至血糖測試儀的測試片插口中，插入時血糖測試片的指示符號要朝上。血糖測試儀發出"嗶"的一聲，確認血糖測試片已插入（如果音量已打開）。血糖測試儀可自動探測編碼。
- 3) 伴隨著"嗶"的一聲，出現了一個血滴符號。現在您可以在2分鐘之內提供血樣。將採血筆對準並貼緊指尖以備採血，然後按下釋放按鈕進行採血。（建議最佳刺針位置為中指或無名指）

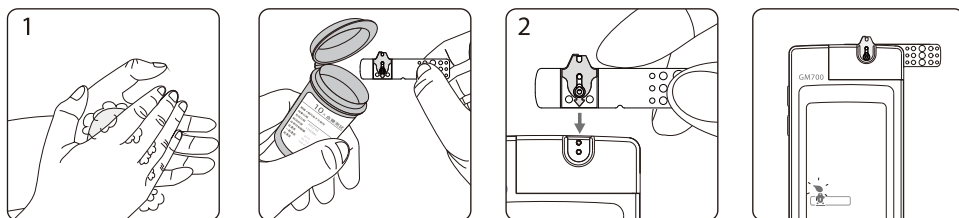


- 4) 用手擠壓您的指尖以便採一滴血樣，我們建議的血樣量為0.75 ~ 3.0 μL 。超過3.0 μL 的血樣量過大。低於0.75 μL 的血樣量可能會導致檢測結果不準確和出現Er4血樣不足的警示訊息。在這種情況下，請用新的測試片重新檢測。

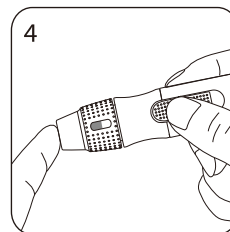

血樣大小範圍

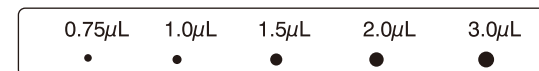

- 5) 將此血滴與血樣入口的邊緣相接觸並保持接觸，直到您聽到"嗶"的一聲（如果音量已打開）且整個觀察窗充滿了血液為止。如果觀察窗沒有充滿血液，或者檢測沒有進行，請棄置該血糖測試片並用一片新的血糖測試片重新檢測。
- 6) 在螢幕上您將看到倒數計時模式。5秒鐘後將顯示檢測結果。如需更詳細的說明，請參考瑞特血糖測試儀使用手冊。
- 7) 以旋轉的方式取下試片並依照法規或行政規定適當的處理或丟棄。

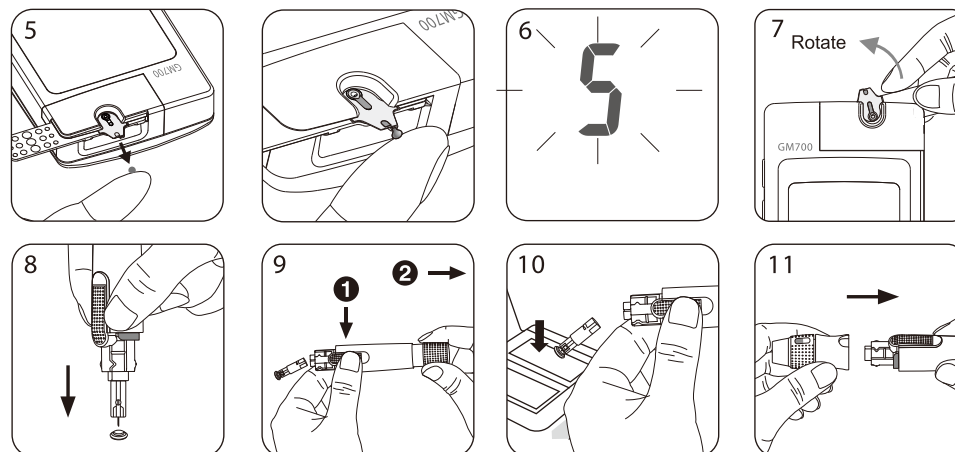

- 8) 拉開採血筆頭，不要碰觸採血針，握住採血筆直接將採血針朝採血針保護蓋按下。
- 9) 先按住釋放按鈕，另一手將採血筆拉柄往後拉到底，可將已蓋上保護蓋的採血針安全退出。
- 10) 將已使用過的採血針丟棄於不會刺傷他人的容器內。
- 11) 檢測完畢後，重新蓋回採血筆筆頭。

詳細的血糖測試儀操作步驟及測量結果說明請參閱使用手冊。

許可證字號: 衛署醫器製字第003501號

BIONIME

製造廠/藥商名稱: 華廣生技股份有限公司大慶廠
製造廠/藥商地址: 台中市南區大慶街二段100號
免付費電話: 0800-371-688 傳真: 886-4-22617586
Email: info@bionime.com
Website: www.bionime.com

EC REP

Bionime GmbH
Tramstrasse 16
9442 Berneck / Switzerland
Email: info@bionime.ch

發行日期: 2014-05

CE
0197

101-3GM700-053
TW