

# 瑞特血糖監測系統

## 瑞特血糖測試儀 RIGHTEST® GM720 - 簡易使用說明

### 測試片插入口

由此插入測試片，直到聽到定位聲音。



### 主/確認按鍵

按1次：確認。  
連按2次：回到主畫面。  
長按2秒：關閉電源。  
按0.5秒：開啟電源。

### 電池蓋

更換電池時向下滑動此蓋，請參閱第一章。 2 x CR2032



### 2維條碼與序號

### 左按鍵與右按鍵

用於操作測試儀，請在後述章節中查看細節。

### 正面



### 1 > 安裝電池


- 1) 安裝第一個電池，+朝上，確保電池以正確方向放置。
- 2) 蓋上接觸彈片，安裝第二個電池。
- 3) 蓋上電池蓋，向上推回原位。




### 2 > 設置您的血糖測試儀-設定日期與時間



按下 按鍵0.5秒 選擇您要顯示的語言，往下移至"確定"處，按下 按鍵確定。

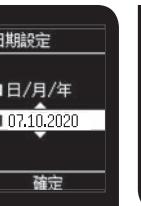

設定日/月/年，選定後按下 按鍵確定。

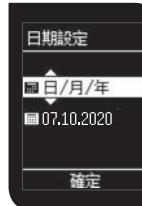

設定日期格式。選定後按下 按鍵確定。



設定時間格式(24/12小時制)，按下 按鍵確定。



**更換電池後，可能需要重新設置血糖儀。**




設定時間，選定後按下 按鍵確定。 現在您可以開始使用瑞特血糖儀RIGHTEST GM720。

### 注意事項：


- 建議勿讓血糖儀靠近強烈的電磁波，以避免操作上的干擾。
- 建議讓血糖儀遠離灰塵、水或任何液體。

### 3 > 準備採血筆

- 1) 筆頭與筆桿旋轉後分開。
- 2) 將採血針放入採血筆的置針架內。
- 3) 旋轉取下採血針保護蓋，並保留保護蓋。

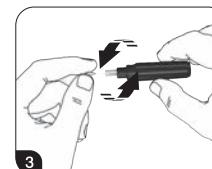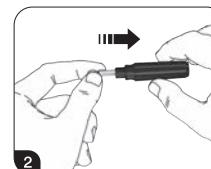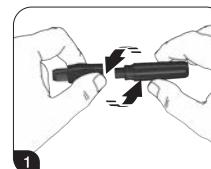


- 4) 筆頭與筆桿旋轉後固定。
- 5) 旋轉筆頭選擇深度，並確認選定數值對準視窗，以便取合適的血量。
- 6) 將手指對準採血筆頭。
- 7) 按下安全按鈕往採血處推壓，採血筆具自動上膛與擊發的功能。

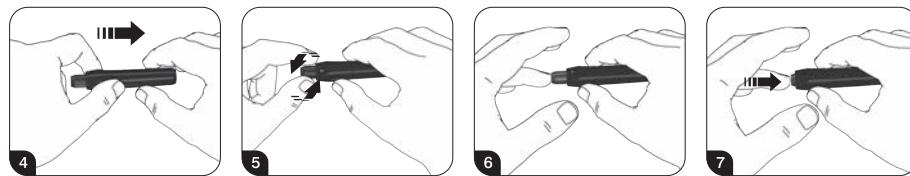

#### 替代部位檢測 (AST)

- 1) 替代部位檢測的功能在於，提供手指以外其他部位的血樣檢測，可以避免一直在手指頭採血、降低疼痛感。
- 2) 選擇透明筆蓋來作不同部位檢測。

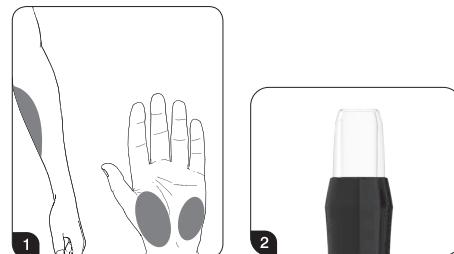

## 4 > 進行量測

- 1) 請先清洗並完全擦乾您的雙手。
- 2) 從試片罐中拿出一片新測試片，並馬上蓋上試片罐的蓋子。
- 3) 如圖示，將測試片插入至測試儀的試片插槽中，測試儀的電源會自動開啟。



- 4) 在短暫地辨識確認(讀取中)後，畫面會顯示"吸入血樣"與血滴圖示。
- 5) 將採血筆對準並貼緊指尖以備採血，按下安全按鈕，推壓採血筆頭。
- 6) 建議最佳針刺位置為中指、無名指與小指。



- 7) 用手擠壓您的指尖以便採一滴血樣，將此血滴與血樣入口的邊緣相接觸並保持接觸，當觀察窗口充滿血液，您會聽到"嗶"的一聲(如果音量已打開)，表示量測已經開始進行。如果測試片得觀察窗口沒有完全充滿血液，血糖測試儀不會進行量測，請棄置該血糖測試片，並用一片新的血糖測試片重新檢測。

檢測所需的最小血樣量為0.75  $\mu\text{L}$ .

0.75 $\mu\text{L}$	1.0 $\mu\text{L}$	1.5 $\mu\text{L}$	2.0 $\mu\text{L}$	3.0 $\mu\text{L}$
•	•	•	•	●

- 8) 在測試結果顯示前，"檢測中"的畫面會持續顯示5秒。若您需要瞭解更多測試結果的資訊，請聯絡您的醫師。
- 9) 從測試儀上取下測試片，並依照法規或行政規定適當地處理或丟棄。



如需要更詳細的說明，請參考瑞特血糖測試儀 RIGHTEST GM720 使用手冊。

發行日期：2020-12

**BIONIME**

■ 製造廠/藥商名稱：華廣生技股份有限公司大慶廠  
■ 製造廠/藥商地址：台中市南區大慶街二段100號  
免付費客服電話：0800-371-688  
E-mail:info@bionime.com  
<http://www.bionime.com>

許可證字號：衛部醫器製字第005354號

101-3GM720-1E1  
TW