

# $\mathbf{R}$ IGHTEST CARE

# Uparivanje uređaja za određivanje glukoze u krvi

- Korak 1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju RIGHTEST CARE.
- Korak 2. Stvorite račun pomoću broja mobilnog telefona.
- Korak 3. Uparite uređaj za određivanje glukoze u krvi s mobilnim uređajem.
- Korak 4. Unesite životne navike.
- Korak 5. Pružit ćemo Vam ciljani raspon razine glukoze u krvi kako biste mogli pratiti razinu glukoze u krvi.

Uređaj za određivanje glukoze u krvi je RIGHTEST GM700SB.



# Korak 2. Stvorite račun pomoću broja mobilnog telefona



Način 1) Za preuzimanje skenirajte QR kôd. Otvorite skener QR kôdova na svojem mobilnom uređaju.



Način 2) Potražite "RIGHTEST CARE" u trgovini App Store ili Google Play, preuzmite je i instalirajte.



Download on the App Store

Uređaj GM700SB je kompatibilan sa sljedećim operativnim sustavima: • iOS: verzija 10.0 ili viša • Android: verzija 5.0 ili viša

#### Korak 3. Uparite uređaj za određivanje glukoze u krvi s mobilnim uređajem

Nakon dovršetka registracije na zaslonu se prikazuje način za uparivanje. Pratite upute kako biste uparili uređaj za određivanje glukoze u krvi.



# Korak 4. Unesite životne navike

 Pritisnite gumb "Ja" i izaberite "Dnevni raspored".

- 2) Postavite "Dnevni raspored".
- Potvrdite dnevni raspored i pritisnite gumb "Natrag". Aplikacija će kategorizirati podatke o razini glukoze u krvi prije/nakon obroka prema Vašim postavkama.

			For	mat 24 sata	U	
	Radni dan	Vikend				
Nakon buđenja	07:00	07:00	*	Radni	dan 2 :00 >	Vikend
Doručak	<b>08:00</b> 07:00 - 09:00	<b>08:00</b> 07:00 - 09:00	= [	oruča 08	:00	J8:00
Ručak	<b>12:00</b> 11:00 - 13:00	<b>12:00</b> 11:00 - 13:00			05.00	4 ок
Večera	<b>18:30</b> 17:30 - 19:30	<b>18:30</b> 17:30 - 19:30		04 05 06	58 59	
				<b>07</b>	<b>00</b>	

Format 24	sata		
	Radni dan	Vikend	
≝ Nakon ≝buđenja	07:00 ~	07:00 \	
⊜ <sup>Doruča</sup> k	08:00 07:00 - 09:00	08:00	
🖴 Ručak	12:00 11:00 - 13:00	12:00 11:00 - 13:00	
🚔 Večera	18:30 17:30 - 19:30	18:30	
🖴 Počinak	23:00 ~	23:00 ~	

# Raspored mjerenja

1) Pritisnite gumb "Ja", zatim "Tjedno testiranje" i zatim potvrdite tjedno testiranje.







Napomena: slika će se malo razlikovati ovisno o modelu mobilnog uređaja.

### Korak 5. Pružit ćemo vam ciljani raspon razine glukoze u krvi kako biste mogli pratiti razinu glukoze u krvi

Odaberite gumb of "Ja" kako biste postavili svoj ciljani raspon razine glukoze u krvi i raspored mjerenja. Aplikacija sadrži unaprijed postavljene prosječne vrijednosti u skladu s Američkim društvom za borbu protiv dijabetesa kako bismo vam pomogli pri praćenju razine glukoze u krvi.

Možete prilagoditi druge ciljane raspone razine glukoze u krvi.

Savjetujte se s liječnikom kako biste doznali prikladne ciljane raspone razine glukoze u krvi.

## Ciljani raspon razine glukoze u krvi

1) Pritisnite gumb "Ja" i izaberite "Ciljana vrijednost glukoze".

Ime i prezime
Żena 1984-09-23 (34) 0,0 cm / 0,0 kg Nema dostupnih BMI po
1 🕰
Ciljna vrijednost glukoze
Nedijabetičar
3,9~5,6 mmol/L Prije obroka
3,9~7,8 mmol/L 2 sata noka_1
Pregled Rezultati Podrška Ja

 Odaberite tip svojeg dijabetesa i dobit ćete prijedlog raspona razina glukoze u krvi.

<	< Ciljna vrijednost glukoze				
	Tip dijabetesa Nedijabetičar 🖂				
	Prije obroka 3,9~5,6				
	2 sata nakon obroka 🛛 3,9~7,8 🗠				
	Vrijeme za spavanje $$ 3,9~6,7 $$ $\sim$				
/	∧ ∨3 ок ут				
	Dijabetes tipa 1 Tip 1,5 dijabetesa Dijabetes tipa 2 Gestacijski domes Pre-dijab				

 Nakon sto završite s uređivanjem postavki za razine glukoze u krvi, pritisnite gumb "Natrag".

< som a vrijednost glukoze						
Tip dijabetesa	Tip 2 🗸					
Prije obroka	3,9~5,6 ~					
2 sata nakon obroka	3,9~7,8 🗸					
Vrijeme za spavanje	3,9~6,7 ~					
HbA1c	<5,7 % 🗸					
Jedinica	mmol/L 〜					

# Intuitivna, sveobuhvatna i vizualna upravljačka ploča



Rezultat HbA1c mjerenja možete dobiti SAMO od svog pružatelja zdravstvene skrbi. Za više informacija obratite se svojem lokalnom distributeru.

#### Uvoznik i distributer za RH: SALVUS d.o.o. Župana Vratislava 11, 49240 Donja Stubica Tel: +385 (0)49 326 - 550 Fax: +385 (0) 49 326 559 www.salvushealth.com info@salvushealth.com

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 40242, Taiwan Tel: +886 4 2369 2388 Fax: +886 4 2261 7586

http://www.bionime.com E-mail: info@bionime.com

BIO-IFU-GM700SB-PAT1/01-RH/22\_03\_2019