

RIGHTEST CARE

Uparivanje uređaja za određivanje glukoze u krvi

- Korak 1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju RIGHTEST CARE.
- Korak 2. Stvorite račun pomoću broja mobilnog telefona.
- Korak 3. Uparite uređaj za određivanje glukoze u krvi s mobilnim uređajem.
- Korak 4. Unesite životne navike.
- Korak 5. Pružit ćemo Vam ciljani raspon razine glukoze u krvi kako biste mogli pratiti razinu glukoze u krvi.

Korak 1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju RIGHTEST CARE.

Način 1) Za preuzimanje skenirajte QR kôd.

Otvorite skener QR kôdova na svojem mobilnom uređaju.



Način 2) Potražite "RIGHTEST CARE" u trgovini App Store ili Google Play, preuzmite je i instalirajte.







Uređaj GM700SB je kompatibilan sa sljedećim operativnim sustavima: • iOS: verzija 10.0 ili viša • Android: verzija 5.0 ili viša





Korak 2. Stvorite račun pomoću broja mobilnog telefona

 Odaberite svoju zemlju i unesite broj mobilnog telefona. 	 Prihvatite uvjete korištenja i politiku privatnosti kako biste mogli upotrebljavati aplikaciju. 	3) Sustav Vam šalje kôd za provjeru na broj mobilnog telefona u obliku SMS poruke.	4) Unesite kôd iz SMS poruke.	5) Nastavite s postavljanjem korisničkog računa. Pritisnite gumb "Nastavite" kako biste postavili račun.	6) Odaberite svoju sliku profila i unesite svoje ime.	7) Odaberite svoje osnovne informacije i pritisnite gumb "Registrirajte se" nakon što završite.
	Uyieti odredbe Bolico privatosi prije uportebe i galico privatosi prije uportebe koja koristi usugu ("Ati i maše", i i maše i i i maše", i osobe koja koristi usugu ("Ati i maše", i osobe koja koristi usugu ("Ati i maše", i osobe koja koristi usugu ("Ati i maše", i uportebe prije uportebe koja koristi usugu ("Ati i maše", i uportebe prije p	Urjeti odredbe Dolno Vas pačljivo pročitajte uvjete upotrebe i polocu privrinsulje upotrebe Rightest CARE. Rightest Care Uvjeti korištenja Dobrodošli u Richtest CARE. Service. 934-XXX-XXX Poslat debro trej SMSm. Otkaži Otkaži Visuju (*V* nir Korisnik), r. rak pročitajte ove Uvjeti i Politiku Uslugu (*V* nir Korisnik), r. rak pročitajte ove Uvjeti i Politiku Uslugu (*V* nir Korisnik), r. rak pročitajte ove Uvjeti i Politiku Distaži upotreba ju potreba ju potreba Uslugu (*V* nir Korisnik), r. rak Pročitajte ove Uvjeti i Politiku Pročitajte ove Uvjeti i Politiku<	bound bo	RIGHTEST CARE Dobrodošii 0934-XXX-XXX Nastavite Ne sad	vitate profilm siku koja će pomoć voja koja voja pomoć spola koja voja koja koja koja koja koja koja koja k	Recite nam o sebi Kojeg ste spola? Muško 2 2 m Kad ste rođeni? 1984/9/23 2 ~ Koji tip dijabetesa imate? Nedijabetičar 3 ~ Registrirajte se

Korak 3. Uparite uređaj za određivanje glukoze u krvi s mobilnim uređajem

Nakon dovršetka registracije na zaslonu se prikazuje način za uparivanje. Pratite upute kako biste uparili uređaj za određivanje glukoze u krvi.



Korak 4. Unesite životne navike

 Pritisnite gumb "Ja" i izaberite "Dnevni raspored".

- mb "Ja" 2) Postav Dnevni raspor
 - 2) Postavite "Dnevni raspored".



 Potvrdite dnevni raspored i pritisnite gumb "Natrag". Aplikacija će kategorizirati podatke o razini glukoze u krvi
prije/nakon obroka prema Vašim postavkama.
Dnevni raspored

Format 24 sata				
	Radni dan	Vikend		
⊯ Nakon buđenja	07:00 ~	07:00 ~		
⊜ ^{Doruča} k	08:00	08:00 07:00 - 09:00		
🖴 Ručak	12:00 11:00 - 13:00	12:00 11:00 - 13:00		
🚔 Večera	18:30 17:30 - 19:30	18:30 17:30 - 19:30		
🖴 Počinak	23:00 ~	23:00 ~		

Raspored mjerenja

1) Pritisnite gumb "Ja", zatim "Tjedno testiranje" i zatim potvrdite tjedno testiranje.







Napomena: slika će se malo razlikovati ovisno o modelu mobilnog uređaja.

Korak 5. Pružit ćemo vam ciljani raspon razine glukoze u krvi kako biste mogli pratiti razinu glukoze u krvi

Odaberite gumb of "Ja" kako biste postavili svoj ciljani raspon razine glukoze u krvi i raspored mjerenja. Aplikacija sadrži unaprijed postavljene prosječne vrijednosti u skladu s Američkim društvom za borbu protiv dijabetesa kako bismo vam pomogli pri praćenju razine glukoze u krvi. Možete prilagoditi druge ciljane raspone razine glukoze u krvi. Savjetujte se s liječnikom kako biste doznali prikladne ciljane raspone razine glukoze u krvi.

Ciljani raspon razine glukoze u krvi

BG označava "Blood Glucose" (razinu glukoze u krvi).

1) Pritisnite gumb "Ja" i izaberite "Ciljana vrijednost glukoze".



 Odaberite tip svojeg dijabetesa i dobit ćete prijedlog raspona razina glukoze u krvi.

< Ciljna vrijednost glukoze

3,9~5,6

3,9~7.8

3,9~6,7

3 ок

Tip dijabetesa

Prije obroka

 \sim

2 sata nakon obroka

/rijeme za spavanje





Kako pronaći više informacija?

Korak 1)

Otvorite RIGHTEST CARE aplikaciju na Vašem mobilnom uređaju.



Korak 2)

Pritisnite gumb "Podrška"



Korak 3)

Odaberite temu koja vas zanima da biste dobili više informacija.

Za više informacija o načinu korištenja aplikacije Rightest CARE i razumijevanju rezultata testa, pogledajte korisnički priručnik za aplikaciju Rightest CARE.

Intuitivna, sveobuhvatna i vizualna upravljačka ploča

Dijabetes tipa 2



Rezultat HbA1c mjerenja možete dobiti SAMO od svog pružatelja zdravstvene skrbi. Za više informacija obratite se svojem lokalnom distributeru.

BIONIME

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist., Taichung City 40242, Taiwan Tel: +886 4 2369 2388 Fax: +886 4 2261 7586 http://www.bionime.com E-mail: info@bionime.com

Uvoznik i distributer za Republiku Hrvatsku: SALVUS d.o.o.

Toplička cesta 100, 49240 Donja, Stubica Tel: +385 (0) 49/ 326 – 550 Fax: +385 (0) 49/ 326 – 559 Web: www.salvus.hr E-mail: info@salvus.hr BIO-IFU-GM700SB-PAT1/01-RH/03_11_2020 -3GM782-0P1

101 HR