



瑞特血糖守護寶

血糖機配對說明

- 步驟1. 下載安裝 瑞特血糖守護寶
- 步驟2. 使用電話號碼註冊帳號
- 步驟3. 綁定血糖機
- 步驟4. 註冊產品序號及掃描店家代碼
- 步驟5. 設定血糖目標、量測計畫與生活作息



瑞特血糖守護寶血糖機配對說明
电子版掃描下載

註：血糖機圖示僅供參考，相關訊息如序號位置請依實際血糖機噴印資訊為主。

華廣生技

步驟1. 下載安裝 瑞特血糖守護寶

- 方法1) 手機掃描QR Code立即下載
請開啟手機 QR code 掃描軟體



- 方法2) 請在 [蘋果 App store](#) 或 [Google play 商店](#)，搜尋「瑞特血糖守護寶」後，進行下載與安裝。


瑞特血糖守護寶



為了方便您的血糖機保固，購買血糖機時可同時下載瑞特血糖守護寶，可協助血糖機保固資料註冊。

步驟2. 使用電話號碼註冊帳號




- 1) 選擇國家及輸入您的手機號碼
- 2) 隱私權條款確認
- 3) 系統發送認證碼簡訊至您的手機
- 4) 輸入簡訊中的認證碼
- 5) 開始建立個人帳號
- 6) 請選擇您的大頭照及輸入您的姓名
- 7) 請輸入基本資料，按下「註冊」即完成

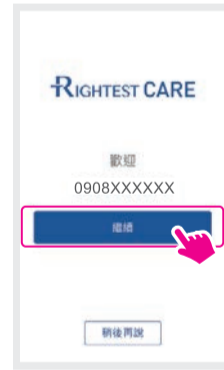

步驟3. 綁定血糖機

第一次註冊成功後會直接顯示血糖機配對畫面，請依照指示綁定血糖機。

- 1) 啟動藍牙血糖機，在手機畫面按下「搜尋」
- 2) 搜尋附近血糖機
- 3) 清單選擇配對血糖機序號
- 4) 點擊清單上的血糖機序號進行配對
- 5) Android：狀態欄下拉，執行藍牙配對請求。
iOS：執行藍牙配對請求。
- 6) 進行藍牙配對要求
- 7) 顯示配對成功
- 8) 血糖機配對後開始進行資料同步
- 9) 完成血糖機配對

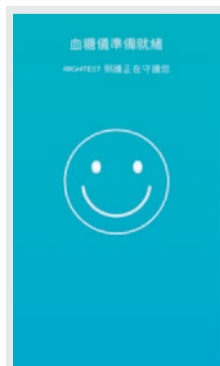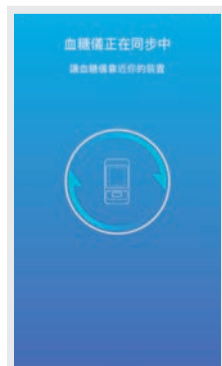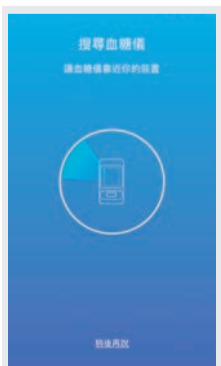

步驟4. 註冊產品序號及掃描店家代碼

- 1) 我的資訊頁裡，點選「血糖機序號」
- 2) 產品保固欄位，按下「尚未註冊」
- 3) 按下「購買地點」進行註冊
- 4) 掃描店家 QR Code
- 5) 確認購買地點，按下「立即註冊」
- 6) 註冊成功後顯示產品保固日期



注意：
若無法取得購買地點的QR Code，您仍然可進行產品保固註冊。

步驟5. 設定血糖目標、量測計畫與生活作息

至「我的資訊」中設定自己的血糖目標、量測計畫與生活作息。

血糖目標預設值是依照美國糖尿病協會及專業醫師建議，提供您做為血糖管理參考。建議您可以與醫師討論調整出最適合您的血糖管控目標。

血糖目標

- 1) 我的資訊頁裡，點選「血糖目標」
- 2) 設定您的糖尿病類型，軟體自動帶出預設的建議血糖目標。
- 3) 血糖目標設定完成後返回「我的資訊」頁



量測計畫

- 1) 我的資訊頁裡，點選「量測計畫」
- 2) 設定血糖量測提醒。設定完成後，量測提醒將自動啟動。



註：圖示會因手機品牌差異，稍有不同。

生活作息

- 1) 「我的資訊」頁裡，點選「生活作息」
- 2) 設定「每日」生活作息時間
- 3) 生活作息設定完成後返回「我的資訊」



註：完成設定後，App可直接以此作息協助判斷血糖資料的餐前後狀態。

直覺易懂視覺化資訊儀表



註：糖化血色素數值需與專業醫療系統連線取得。進一步了解，請撥客服專線 0800-371-688

如何找到更完整的操作指南

- 步驟 1) 開啟手機中的瑞特血糖守護寶
- 步驟 2) 點擊「學習與輔助」功能分頁



- 步驟 3) 點擊「操作指南」頁籤
- 步驟 4) 尋找您有興趣的教學主題，點擊後即可進入閱讀。



BIONIME
製造廠/藥商名稱：華廣生技股份有限公司大慶廠
製造廠/藥商地址：40242台中市南區大慶街二段100號
免付費客服電話：0800-371-688
Email: info@bionime.com
www.bionime.com.tw

本說明書搭配瑞特血糖守護寶(衛部醫器製字第005985號)及您的行動裝置使用